

# MADE IN EUROPE



Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

# (NL)


## Gebruikershandleiding

22\_20251702\_NL

### Dress Master Leg

Pat. BA 2022 00046

Gebruiksmodel nr. 20 2023 105 598

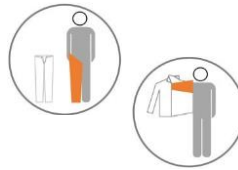

Artikelnr.	HMI nr.	Naam - Grootte	UDI-DI/GTIN
MC 001-0995	133644	Dress Master Leg	5744001974100



Verordening MDR 2017/745 voor medische hulpmiddelen klasse 1

ISO 12 03 03 20



De originele Scandinavische  
Concept van menselijke omgang



Distributeur NL

**Solution<sup>2</sup>Care**

www.solutions2.care  
tre@solution2.care

Developed &  
Manufactured by:



master-care.dk

# Bedankt voor het kiezen van een product van Master Care A/S.

We raden u aan de volgende gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het product of de producten gebruikt.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op de afgebeelde producten, op voorwaarde dat er geen aanpassingen of wijzigingen zijn aangebracht en dat de producten worden gebruikt op de manier die wordt aanbevolen in de gebruikershandleiding. Als de klant wijzigingen aanbrengt, reparaties uitvoert of het product in andere combinaties gebruikt dan master care A/S aanbeveelt, vervalt de CE-markering en daarmee ook de garantie op het product van master care A/S. Neem in geval van twijfel contact op met Master Care A/S.

## MDR (EU) 2017/745:

De producten in deze gebruikershandleiding voldoen aan de normen van de Medical Device Regulation MDR (EU) 2017/745 voor klasse 1-apparaten en zijn dienovereenkomstig CE-goedgekeurd.

## Aangegeven doel van het product:

Het product is een kant-en-klare schuifbuis voor gebruik bij het aankleden. De dubbele schuif minimaliseert het risico op snijwonden bij de zorgvrager en minimaliseert de ergonomische belasting voor de zorgverlener bij het aankleden.

## Toepassing van het product:

Het product wordt aangebracht op een of beide benen/armen en het kledingstuk wordt over de Dress Master geschoven. Zodra het kledingstuk is aangetrokken, kan de Dress Master worden verwijderd door aan de bevestigde bandjes te trekken.

## Contra-indicatie:

Niet rechtstreeks op open wonden gebruiken. Wonden moeten eerst worden .

## Waarschuwing:

Laat het product niet op de grond liggen, want dan kan het vallen.

## Risicobeoordeling:

Voorafgaand aan het gebruik moet een risico- en functiebeoordeling worden uitgevoerd voor de daadwerkelijke gebruiker om er zeker van te zijn dat de kleding ergonomisch en juridisch verantwoord is.

## Kennis van het product/de overdracht:

Het is belangrijk dat gebruikers/helpers van de producten instructie hebben gekregen in het gebruik van de producten en de gebruikershandleiding grondig hebben gelezen. Onze distributeur Solutions2care verzorgt trainingen in het gebruik van de producten en op onze websites vindt u instructies voor het gebruik van de meeste producten.

## Levensduur:

Het product heeft naar verwachting een levensduur van 1-3 jaar bij normaal gebruik en wassen. De levensduur van het product is afhankelijk van het gebruik, de belasting en hoe en hoe vaak het product wordt gewassen.

Producten die niet langer voldoende wrijvingsvermindering bieden voor de gezondheid van zowel de zorgverlener als de gebruiker, moeten worden weggegooid. Producten moeten regelmatig worden geïnspecteerd en als er defecte stiksels of beschadigde oppervlakken worden aangetroffen, moet het product worden weggegooid.

## Garantie:

master care A/S en de distributeur geven 2 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten als het product correct is gebruikt.

## Ongelukken en verwondingen door verkeerd gebruik:

Incidenten moeten altijd worden gemeld aan de juiste nationale bevoegde instantie en aan Master Care A/S of haar distributeur.

master care A/S en zijn distributeur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of productschade als het product wordt gebruikt in strijd met het doel/gebruik zoals aangegeven door de fabrikant.



# Gebruikershandleiding - Dress Master

## Dress Master:



1. Leg een groot stuk glijmateriaal onder de benen en heupen van de gebruiker om de wrijving tussen lichaam en matras te minimaliseren.



2. Plaats de Dress Master zo dat de korte kant bij het kruis zit en de lange kant naar buiten. Plaats de trekbandjes aan de buitenkant.



3. Schuif de Dress Master over de voet en schuif hem langs het been omhoog. Zorg ervoor dat er materiaal onder de billen van de gebruiker glijdt.



4. Als de gebruiker het andere been niet kan gebruiken, wordt Dress Master op beide benen toegepast.



5. Schuif de broek over de 2 Dress Masters en trek deze helemaal omhoog onder het bekken/billen van de gebruiker.



6. Controleer of de broek aan de achterkant helemaal omhoog zit en recht is door been z.m. te buigen en licht van je af te draaien. Sluit de broek.



7. Verwijder Dress Masters één voor één door tegelijkertijd aan de voorste en achterste trekband te trekken.



8. Zodra beide Dress Masters verwijderd zijn, verwijder je het onderliggende glijmateriaal.



9. Dress Master kan ook worden gebruikt voor het aankleden van het bovenlichaam. Of gebruik de Dress Master Arm



master-care.dk

# Gebruikershandleiding - Dress Master

## Technische specificaties

ISO 12952-1:2015

Textiel - Beoordeling van de brandbaarheid van beddengoed

- Deel 1: Gloeiende sigaret.

Artikelnummer - Naam	Grootte:	Max. gebruikershoogte:	Max. gebruikersgewicht:	Inhoud van het product:	Gewicht verpakking:
001-0995 Dress Master Leg	L 150 x B 37/29 cm	Niet van toepassing	150 kg	97% polyester, 76% polyamide, 8% siliconen.	0,15kg

## WAARSCHUWINGEN



Laat de gebruiker het product nooit op de rand van het bed liggen.



Laat het product nooit op de grond liggen.



Zorg er altijd voor dat de gebruiker niet verstrikt raakt in de riemen.



Zorg ervoor dat alle relevante remmen geblokkeerd zijn voordat je gaat rijden.



### CE-markering:

De producten zijn goedgekeurd volgens de toepasselijke CE-markeringsverordening en voldoen aan Verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen. Klasse 1-apparatuur.



### Gebruikersgewicht:

Aanbevolen max. gebruikersgewicht: 150 kg



### Wassen:

Dit product kan in de wasmachine worden gewassen op max. 85°C. Lagere was temperaturen verlengen de levensduur aanzienlijk.



### De pH-waarde van het wasmiddel:

pH-waarde voor tussen pH 5 - 9.



### Spoelglansmiddel:

Gebruik geen wasverzachter, omdat dit de glij-eigenschappen aanzienlijk vermindert.



### Droogtrommel:

Dit product mag alleen voorzichtig in de droogtrommel bij maximaal 40 °C. Drogen aan de lucht verlengt de levensduur aanzienlijk.



### Oppervlakkige reiniging:

Dit product kan oppervlakkig worden gereinigd met een doek en zeep.



### Desinfectie:

Dit product is bestand tegen te sterke droging met ontsmettingsmengsels op alcoholbasis tussen pH 5-9.



### Strijken:

Verdraagt geen strijken.



### Chemische reiniging:

Verdraagt geen stomerij.



### Bleken:

Verdraagt geen bleekmiddel.



### Inspectie:

Controleer het product regelmatig, bij voorkeur voor elk gebruik. Controleer of er geen schade is aan de stof, riemen, naden enz. Als het product veel wrijving heeft of op een andere manier kapot is, moet het product worden weggegooid.



### Gebruikershandleiding:

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik.



### Verwijdering:

Zorg er altijd voor dat je het volgens de geldende voorschriften weggooit.

Vind ons op :



Distributeur NL

**Solution<sup>2</sup>Care**

www.solutions2.care  
trea@solutions2.care

Molenkap 15 8521 MH Sint Nicolaasga (Fr) NL  
E. trea@solutions2.care M. 06- 4674 5109  
I. www.solutions2.care  
Webshop: www.transferhulpmiddeleninbed.nl

